

Bima allround

Stabil, komfortabel og trykafastende kørestolspude. Udviklet til brugere som er afhængige af kørestol og jævnlige forflytninger og som har svært ved at variere den siddende stilling. Bima Allround giver god trykaflastning og uafhængigt af kropsform tilpasser puden sig efter brugeren og aflaster sædeknoglerne og halebenet.

Bima allround er forebyggende mod sår. Den kan anvendes selv når der findes risiko for tryksår.




- ✓ Former sig efter brugeren
- ✓ Fast base med sædebrønd
- ✓ Viskoskum CONFOR® foam i sædebrønd
- ✓ Aflaster sædeknoglerne og haleben
- ✓ Skal ikke indstilles eller tilpasses
- ✓ Svag anatomisk form med bendeler
- ✓ Afrundet bagkant
- ✓ Udtag til rygrør
- ✓ Buet eller plan bund
- ✓ Flere størrelser
- ✓ Tilpasningsmuligheder

Konstruktion

CONFOR® foam indlæg i sædebrønden gør puden luftig og komfortabel.

Blød overdel

Mærket i henhold til Hjælpeinstitutets foreskrifter med væskebestandig tekst

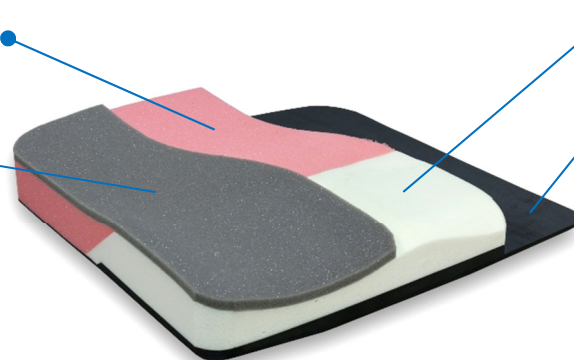

Anatomisk skumbase med bendeler.

Bund i celleplast gør puden formstabil og samtidig let.

Indlægget af viscoelastisk skum i sædebrønden gør at puden tilpasser sig hver enkelt individ og ger samtidig stabilitet. Viskoelastisk skum af bedta kvalitet, CONFOR® foam, høj stabilitet, god luftcirkulation samt meget god trykfordelning.

Inkontinensovertræk

Et inkontinensovertræk ingår som standard.

Betræk

Puden har som standard et heldækkende betræk i lamineret sort velour. Betrækkets fibre er monteret modsat sidderetningen. Dette forhindrer fremadskridning og gør samtidig sidevers forflytninger og forflytninger bagud nemmere. Betrækkets underside er monteret med antiskridmateriale for bedst mulig fiksering i alle typer kørestole.

Buet og plan bund

Buet bund anvendes i kørestole med hængesæde for at få et plant sæde. Plan bund anvendes når kørestolen har en fastere og når rullstolen har en fastere og mere stabilt sæde hvor det ikke er nødvendigt at kompensere for hængesæde.

Ekstra betræk

For at bestille ekstra betræk angiv **B** efter varenummeret f.eks BIMA4545-KB

Tilbehør

Inkontinens-/beskyttelsesovertræk indgår som standard men findes også som tilbehør.

For at gøre det nemmere ved vask er beskyttelsesovertrækket udformet som en hætte. For at bestille en inkontinenshætte angiv **I** efter varenummeret f.eks. 4545-KI.

Ved inkontinens skal et beskyttelsesovertræk anvendes. Basen beskyttes og behøver normalt ikke at rengøres. Beskyttelsesovertrækket kan anvendes på to måder.

Alternativ 1

Hætten monteres over den betrukke pude og beskytter således både betræk og skumbase.

Alternativ 2

Hætten kan også monteres på skumbasen under det heldækkende betræk.



Skumbasen beskyttes og ved korrekt håndtering vil den være frisk selv for nye brugere.

Tilpasninger

Bima allround kan tilpasses direkte på fabrikken. Efter beskrivelse/ tegninger kan vi tilpasse på mål, sædevinkel og forskellig benlængde m.m.


Kontakt os for mere information om tilpasningsmulighederne **Tlf. 47 10 77 55**

Målemetoder og udvikling

Vi anvender en tryktestmåtte fra Xsensor Technology Corporation.

Xsensor X3 PX100 36 36 02 med 1296 målepunkter.

Trykket på overfladen er individuel og påvirkes af kørestolens sædevinkel og højde på fodstøtterne. En tryktest viser kun pudens trykfordelende og trykaflastende egenskaber for personen ved testen.

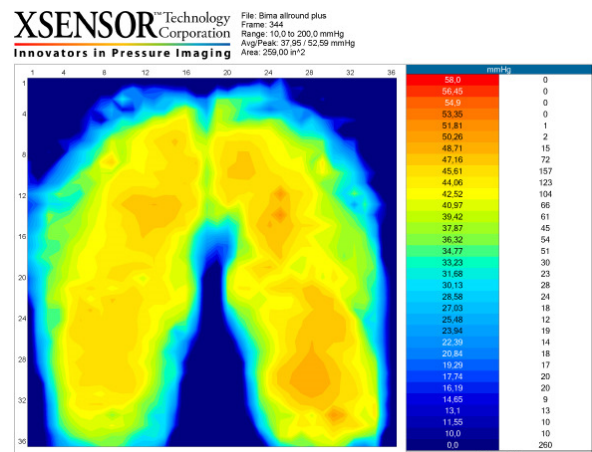

Bima allround 45x43x6,5cm buet, brugervægt 92kg. Skala 10,0 – 58,0mmHg. Avg/peak: 37,95 / 52,59 mmHg.

Bima allround med buet bund. Varenummer, mål og max brugervægt

(cm)	Sædedybde	Sd/ Sd ^{tot} där Sd = Sædedybde til rygrør og Sd ^{tot} = Sædedybde på midten							Højde (cm)	Max vægt (kg)
Bred	35/38	38/41	40/43	43/46	45/48	47/50	50/53	55/58		
35	BIMA3535-B	BIMA3538-B	BIMA3540-B	BIMA3543-B					6-7	100
37,5	BIMA3735-B	BIMA3738-B	BIMA3740-B	BIMA3743-B	BIMA3745-B	BIMA3747-B	BIMA3750-B		6-7	110
40	BIMA4035-B	BIMA4038-B	BIMA4040-B	BIMA4343-B	BIMA4045-B	BIMA4047-B	BIMA4050-B		6-7	125
42,5		BIMA4238-B	BIMA4240-B	BIMA4243-B	BIMA4245-B	BIMA4247-B	BIMA4250-B		6-7	125
45		BIMA4538-B	BIMA4540-B	BIMA4543-B	BIMA4545-B	BIMA4547-B	BIMA4550-B		6-7	125
47,5		BIMA4738-B	BIMA4740-B	BIMA4743-B	BIMA4745-B	BIMA4747-B	BIMA4750-B		6-7	135
50		BIMA5038-B	BIMA5040-B	BIMA5043-B	BIMA5045-B	BIMA5047-B	BIMA5050-B		6-7	140
52,5			BIMA5240-B	BIMA5243-B	BIMA5245-B	BIMA5247-B	BIMA5250-B		6-7	150
55			BIMA5540-B	BIMA5543-B	BIMA5545-B	BIMA5547-B	BIMA5550-B	BIMA5555-B	6-7	150
57,5			BIMA5740-B	BIMA5743-B	BIMA5745-B	BIMA5747-B	BIMA5750-B	BIMA5755-B	6-7	150
60					BIMA6045-B	BIMA6047-B	BIMA6050-B	BIMA6055-B	6-7	150

Bima allround med plan bund. Varenummer, mål og max brugervægt

(cm)	Sædedybde	Sd/ Sd ^{tot} där Sd = Sædedybde til rygrør og Sd ^{tot} = Sædedybde på midten							Højde (cm)	Max vægt (kg)
Bred	35/38	38/41	40/43	43/46	45/48	47/50	50/53	55/58		
35	BIMA3535-P	BIMA3538-P	BIMA3540-P	BIMA3543-P					6-7	100
37,5	BIMA3735-P	BIMA3738-P	BIMA3740-P	BIMA3743-P	BIMA3745-P	BIMA3747-P	BIMA3750-P		6-7	110
40	BIMA4035-P	BIMA4038-P	BIMA4040-P	BIMA4343-P	BIMA4045-P	BIMA4047-P	BIMA4050-P		6-7	125
42,5		BIMA4238-P	BIMA4240-P	BIMA4243-P	BIMA4245-P	BIMA4247-P	BIMA4250-P		6-7	125
45		BIMA4538-P	BIMA4540-P	BIMA4543-P	BIMA4545-P	BIMA4547-P	BIMA4550-P		6-7	125
47,5		BIMA4738-P	BIMA4740-P	BIMA4743-P	BIMA4745-P	BIMA4747-P	BIMA4750-P		6-7	135
50		BIMA5038-P	BIMA5040-P	BIMA5043-P	BIMA5045-P	BIMA5047-P	BIMA5050-P		6-7	140
52,5			BIMA5240-P	BIMA5243-P	BIMA5245-P	BIMA5247-P	BIMA5250-P		6-7	150
55			BIMA5540-P	BIMA5543-P	BIMA5545-P	BIMA5547-P	BIMA5550-P	BIMA5555-P	6-7	150
57,5			BIMA5740-P	BIMA5743-P	BIMA5745-P	BIMA5747-P	BIMA5750-P	BIMA5755-P	6-7	150
60					BIMA6045-P	BIMA6047-P	BIMA6050-P	BIMA6055-P	6-7	150

Fakta

Klassificering: Trykafastende ISO-kode 043303
pude beregnet til tryksårsforebyggelse

Brandnorm: Opfylder ISO 7176-16

Garanti: 2 år

CE-mærket jf. (LVFS) MD 93/42/EEG

Mærket i henhold til Hjælpedelsinstituttets foreskrift

Pudens vægt: Bima allround 42,5x40x7cm buet 1,15kg

Materiale i skumbase: Polyeter, Polyuretan, polyeten, CONFOR® foam.

Materiale i betræk: Sort strækbar velour, antiglid

Rengøring:

Skumbasen rengøres ved at aftørre den med desinfektionsmiddel alternativt med vand og sæbeopløsning 40°C som forbehandles med bakteriehæmmende middel.

Betrækket vaskes i maskine 60°C, med vrangen udad og lukket lynlås. Derefter centrifugering og tørretumbling.

Bima allround er støbt med 50mm CONFOR® foam i sædebrønden med forskellig densitet/hårdhed afhængig af størrelse og brugervægt. Forskellig densitet i skummet anvendes for at opnå en bedre aflastning af sædeknoglerne og halebenet for de små og lette respektivt de store og tunge brugere.

- CONFOR® foam 42 rosa - 125kg
- CONFOR® foam 45 blå - 150kg

MEYRA®
We move people.