

# MELISSA PARAD PLUS

## og Melissa Parad sengemadras



Blød og behagelig madras i to lag med trykaflastende egenskaber og valgfrit betræk. 14 cm. tyk hvoraf 6 cm. er hypersoft skum (øverst). Udviklet som hjælpemiddel til behandling af tryksår i kategori 2-3.



**Järven Health Care**

# Melissa Parad Plus

Melissa Parad Plus er en trykafastende tolags madras med en højde på 14 cm. Bunden/nederste del er fremstillet i højelastisk koldskum 50 kg./m<sup>3</sup> og er 8 cm., toplaget på 6 cm. er fremstillet i hypersoftskum 45 kg./m<sup>3</sup>. Melissa Parad Plus er udviklet til tryksårskategori 2-3.

De valgfrie betræk er væsketætte og forhindrer dermed urin og blod mm. i at trænge igennem. Hygiejnebetrækket er åndbart og fremstillet af en raslefri 2-vejs strækbar polurethanvæv. Betrækket opfylder SS8760001 og har lynlås med overfaldskant på 3 sider eller 4 sider (RXI-5) for nemmere at kunne af- og påmonteres ved vask.

**!** Vælg imellem 2 forskellige betræk til din madras. Det enkle RX-5 som er uden håndtag og evakueringsfunktion eller RXI-5 med håndtag og indbygget evakueringsfunktion.



RX-5



RXI-5



Gælder ej  
bæddmadrass

## FAKTA

| Best. Nr. | Artikel                        | Størrelse:                |
|-----------|--------------------------------|---------------------------|
| 40800-P   | Melissa Parad Plus             | 200/205/210 x 80 x 14 cm  |
| 40801-P   | Melissa Parad Plus             | 200/205/210 x 85 x 14 cm  |
| 40802-P   | Melissa Parad Plus             | 200/205/210 x 90 x 14 cm  |
| 40803-P   | Melissa Parad Plus             | 200/205/210 x 105 x 14 cm |
| 40804-P   | Melissa Parad Plus             | 200/205/210 x 120 x 14 cm |
| 40805-P   | Melissa Parad Plus             | 200/205/210 x 100 x 14 cm |
| 10470-P   | Melissa Parad Plus Bæddmadrass | 200 x 80 x 6 cm           |
| 10471-P   | Melissa Parad Plus Bæddmadrass | 200 x 85 x 6 cm           |
| 10472-P   | Melissa Parad Plus Bæddmadrass | 200 x 90 x 6 cm           |
| 10473-P   | Melissa Parad Plus Bæddmadrass | 200 x 105 x 6 cm          |
| 10474-P   | Melissa Parad Plus Bæddmadrass | 200 x 120 x 6 cm          |
| 10475-P   | Melissa Parad Plus Bæddmadrass | 200 x 100 x 6 cm          |

**Vægt – madras:** Melissa Parad Plus: ca. 11 kg. 8 cm. højelastisk koldskum 50 kg./m<sup>3</sup> samt 6 cm. hypersoft skum 45 kg./m<sup>3</sup>.

**Garanti – madraskerne:** 3 år imod sammenfald af madraskernen – B-værdi iflg. SS876 00 11

**Garanti – betræk:** 3 år imod fabriktionsfejl. Vi garanterer betrækkets væsketæthed i 25 vask ved 95° og tørretumbling ved 30°. Ikke med skyllemiddel.

**Brandstandard:** Madrassen er testet og opfylder SS 876 000 01, EN 597-1 & 2, normalrisiko.

**Brugervægt:** 1-150 kg.

**Genbrug:** Madrassen inkl. betræk kan deponeres til genbrug og skal sorteres som brandbart affald. Ingen demontering er nødvendig.

**Mærkning:** Produktionsår, måned, dag, EAN, vaskeanvisning, opfyldte standarder samt placering i seng.

## Trykmålingsresultat:

| Madras        | Stor indtrykningskrop 300 N | Stor indtrykningskrop 600 N | Lille indtrykningskrop 40 N |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Melissa Basic | 38                          | 52                          | 68                          |
| Melissa 12    | 34                          | 52                          | 60                          |
| Melissa Parad | 33                          | 52                          | 67                          |
| Melissa Heavy | 32                          | 46                          | 67                          |
| Melissa Flex  | 31                          | 51                          | 62                          |

Lave værdier giver lavt tryk mod kroppen, alle værdier i mm. Hg. For tunge brugere er det særskilt vigtigt at trykket under "Stor indtrykningskrop 600 N" er så lavt som muligt.

## FAKTA OM TRYKMÅLING:

For at undersøge konsekvenserne fra forskellige kroppe har Swerea IVF udviklet indtrykningskroppen, som simulerer formen på hver en del af menneskekroppen. Ved at give disse indtrykningskroppe en belastning som er repræsentativt for en middeltung menneskekrop kan man vha. trykmåtter på objektet vurdere hver enkelt madras og seng. Denne målemetode er bekræftet nærmere i Svensk standard med betegnelsen SS 876 00 13.



Læs brugsanvisningen før ibrugtagning af produktet.

## Klassificering af trykresultat for madrasser i ny stand:

| Belastning                  | Ekstra Lav | Lav       | Middel    | Høj       |
|-----------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| Stor indtrykningskrop 300 N | <30,0      | 30,0-34,9 | 35,0-39,9 | 40,0-44,9 |
| Stor indtrykningskrop 600 N | <45,0      | 45,0-52,9 | 53,0-60,9 | 61,0-68,9 |
| Lille indtrykningskrop 40 N | <45,0      | 45,0-52,9 | 53,0-60,9 | 61,0-68,9 |

  
**Järven Health Care**

Bromsvägen 3 | SE-891 60 Örnsköldsvik | SWEDEN  
Telefon: 0660-22 28 50 | Telefax: 0660 - 824 10  
www.jarven.se | healthcare@jarven.se