

AKTIVLINE

Dynamisk siddestilling

den originale



Hv?d er AKTIVLINE og hv?d k?n den tilbyde?

Aktivline er.....

- En stol som kan bruges til nogle af de borgere der vælges støb til
- En stol som kan opbygges med formstøb af siddestillingen
- Særlig velegnet til CP'ere med grovmotorisk funktionsniveau (4)-5
 - Alvorlige begrænsninger omkring hoved- og truncuskontrol
 - Siddeevnen svarer til Niveau 2 jvf. 7 siddenniveauer – massiv støtte og ingen siddeevne uden støtte
- Dynamisk siddeenhed med 3 variable flader, som bevæger sig uafhængigt af hinanden. Det vil sige at bevægelsen bestemmes af borgeren
- Omdrejningspunkt er ud for ankel-, knæ- og hoftel. Der er konstant kontakt mellem stol og borger => konstant taktil stimuli
- Hovedet/skulder forbliver i ca. samme position => vestibulær- og synssans er stabile
- Tryk fra bespænding er mindre i dynamisk enhed
- Dynamikken i stolen betyder, at der opnås mindre tryk på f.eks. skulder og lår i forbindelse med spasticitet
- Variabel siddestilling med stabilitet => øget sidde tid => forbedret livskvalitet.

Set med vores perspektiv opnår vi følgende:

- At der skabes bevægelse i siddestillingen. Én siddestilling er ikke realistisk med CP'ere
- Øget siddekomfort
 - Der presses ikke mod fast underlag
 - Fremadskridning i sædet begrænses, da stolen følger borgerens bevægelser
- Bevægelse og stabilitet bibeholdes
- Understøttelse af respiration
- Understøttelse af fordøjelse
- Forebygger trykskader
- Forbedret kontrol af frivillige bevægelser
- Øget sidde tid
- Reduktion af smerter i bevægeapparatet

Neurodynamisk set

Bevægelse er vigtig for både det centrale og det perifere nervesystem. Eftergivlighed af nervevæv mindskes ved inaktivitet. Nervevæv "klistrer" sammen med det omkringliggende væv => smerter, sovende fornemmelser, prikkende følelser i området.

MEYRA ApS

Støberivej 1 - 3660 Stenløse
www.meyra.dk salg@meyra.dk

Tlf. 47 10 77 55

AKTIVLINE

Dynamisk siddestilling

den originale

Hv?d er AKTIVLINE og hv?d k?n den tilbyde?

Kontr?kturer er en del af det ?t h?ve CP

Kontr?kturer er en del af CP?rens hverdag. Det f?rer ofte til....

- Forkortede haser
- Korte h?lsener
- Stramme hofteadduktorer

Kan vi uds?tte/hindre disse problemer vil det v?re optimalt, s? reparationskirurgi kan udskydes/undgås.

Ved v?lg af Aktivline sk?l du v?re opm?rksom p? ?t.....

- Stolen ofte kan v?re st?rre end traditionelle stole/nuv?rende stol for at kunne have plads til stolens dynamik
- Prisniveauet ligger noget over standardstole med skalopbygning—uden dog at man kan drage en direkte sammenlignelig parallel
- En evt. luxation af hofteled er unders?gt s? der kan tages h?jde for dette i stolen
- At der kun begrænset kan arbejdes med rotationsbev?gelser i stolen
- Tr?erne ikke vokser ind i himlen—Det er "stærke" borgere", s? reparationer kan ikke undgås men kraftigt minimeres.

Forløbet med v?lg og tilp?sning af Aktivline

Afhængigt af hvor kompliceret den enkelte sag er og hvilket funktionsniveau borgeren har vil sagsgangen med Aktivline typisk v?re opdelt i f?lgende faser:

1. afpr?vning, fremvisning og m?ltagning i standard stol.
2. Ved komplekse sager—ofte de sager hvor vi laver aftryk og skumafstøb—vil der mange gange efter f?rste afpr?vning v?re behov for at der laves en 2. afpr?vning med en stol der enten passer bedre til brugerens m?l eller med en stol der har en eller flere vigtige funktioner. Denne stol skaffes i en speciel l?nepulje best?ende af over 80 forskellige varianter og vil normalt vis v?re til r?dighed 2-3 uger efter f?rste afpr?vning.
2. afpr?vning samt evt. pr?vestøb laves (hvis muligt) vha, vakuum teknik og scanning af stol/s?deenhed
- Det besluttes om man skal forts?tte med Aktivline. N?r beslutningen er truffet og valget er en Aktivline produceres den individuelt tilpassede s?deenhed/stel i Tyskland i en udgave hvor s?de og stel ikke er færdigbehandlet (hvis dette ?nskes) og hvor der ikke er polstret færdigt s?ledes at der fortsat kan laves korrektioner. Udgifterne til det individuelle s?de mm. faktureres kunden som en del af f?rste rate p? stolen.
3. afpr?vning foretages nu med henblik p? at korrigere mindre tilretninger mm. frem imod endelig færdigg?relse.
- Efter godkendelse fra bruger/visitorator/familie mm. sendes stolen til Tyskland for endelig montage. 2-3 uger efter er stolen klar til endelig levering.
- Opf?lgning p? stolen foretages efter behov dog minimum efter 6 m?ned samt 12 m?ned og med en l?bende dialog imellem bruger, visitorator, familie mm.

MEYRA ApS

St?berivej 1 - 3660 Stenl?se

www.meyr?.dk salg@meyr?.dk

Tlf. 47 10 77 55