

# Opticell 4

## Dynamisk vekseltrykmadrass til kategori 4

Opticell 4 er en dynamisk vekseltrykmadrass (20 cm. høj) med automatisk pumpe som placeres direkte på sengegavlen. Den anvendes både forebyggende og som hjælpemiddel til smerte og tryksårpatienter til og med kategori 4. Opticell 4 er en yderst funktionel madras velegnet til de fleste brugere.



Opticell 4 har udskiftelige celler og leveres med et aftageligt hygiejnebetræk der nemt kan vaskes og desinficeres. Madrassen har indbygget CPR ventil for hurtig tømning af luften ved HLR-situationer. Leveres med en meget lydsvag Pumpe (Q7) som er let at anvende—med vekslende tryk eller med statisk lavt tryk. Pumpen kan indstilles til 10, 15, 20 eller 25 minutters veksling og har desuden en automatisk funktion der indebærer at madrassen indstiller sig efter brugerens vægt og ændringer i liggemønster.

Patienten kan ligges direkte på madrassen imens den fyldes og det tager normalt 15 minutter uden patient og 30 minutter med patient.

### Egenskaber

**Fugtighed:** Inkontinensbetræk som ånder—dvs. slipper luft ud fra kernen samtidig med at det er vandtæt. Det mindsker friktion og eventuelle komplikationer for brugeren.

**Plejefunktion:** I forbindelse med pleje af patienten kan madrassen fyldes helt med luft for at sikre et stabilt leje. Glemmer man at sætte madrassen til vekseltryk så indstiller den sig selv automatisk til denne funktion efter 30 minutter.

**Transport:** Automatisk indstilling på pumpen til transport (max. lufttryk)

**Hygiejne:** Betrækket er nemt at rengøre. Det kan tørres af med sprit/desinfektionsmiddel eller maskinvaskes ved max. 95° (Celler og underside spules af i max. 70°) Alt dokumenteret jf. gældende standarder.

**Sikkerhed 1:** CPR ventil som hurtigt (30 sek.) og enkelt kan lukke luften ud af madrassen—sikrer en hurtig tømning til HLR (Hjerte-Lunge-Redning).

**Sikkerhed 2:** Pumpen har en alarmfunktion med kraftig lys og lyd som advarer ved for lavt lufttryk i madrassen.

### Fakta:

Bestillingsnummer:	Mål:	HMI nummer:	Brugervægt max.:	Brandstandard:
Opticell4-5	80 x 200 x20 cm.	105018	250 kg.	SS 876 00 01, EN 597-1&2
Opticell4-1	85 x 200 x 20 cm.	104993	250 kg.	SS 876 00 01, EN 597-1&2
Opticell4-2	90 x 200 x 20 cm.	104994	250 kg.	SS 876 00 01, EN 597-1&2
Opticell4-3	105 x 200 x 20 cm.	104995	250 kg.	SS 876 00 01, EN 597-1&2
Opticell4-4	120 x 200 x 20 cm.	104996	250 kg.	SS 876 00 01, EN 597-1&2

### Opbygning:

20 celler, cell-in-cell system som er ventilerende (low air loss). Udskiftelige og fremstillet i PU. Dahlia Bi-elastisk og blødt hygiejnebetræk. Digital Q7 pumpe med sensor (automatisk indstilling til korrekt brugervægt) kapacitet 18-20 liter/min.